


INSTRUCTION MANUAL/MANUAL DE INSTRUCCIONES
Model/Modelo: Meseta.

Última revisión: 7 de Abril 2021
Last revision date: April 7th 2021

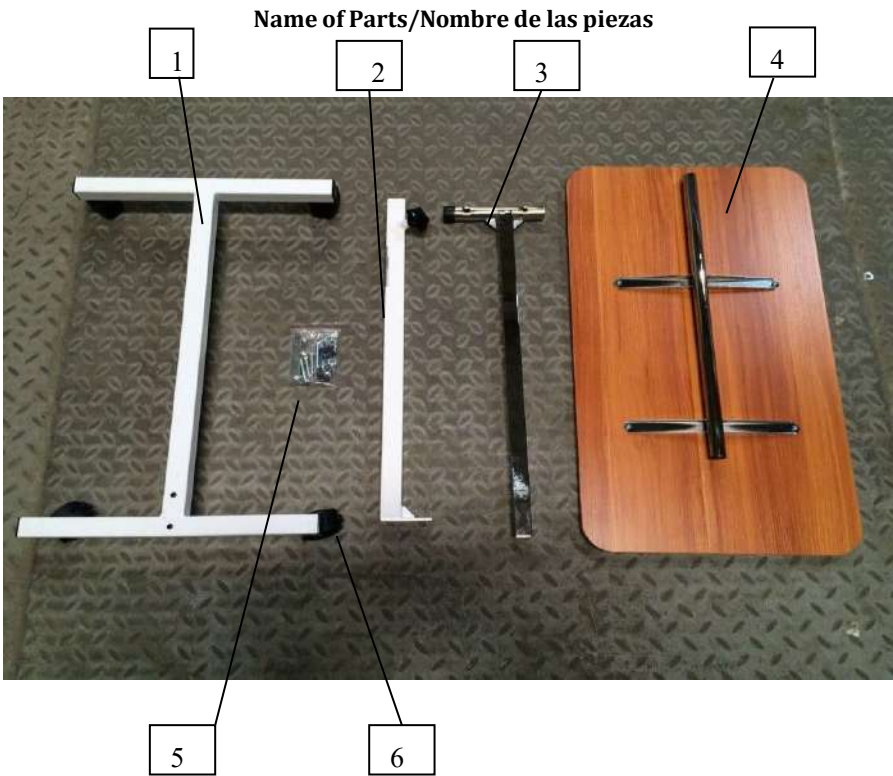

Number/ número	English	Español
1	Base frame	Marco base
2	Table supporting tube	Tubo de soporte para la mesa
3	Adjusting tube	Tubo de ajuste
4	Table	Mesa
5	Screws/nuts/tooling (as below image)	Tornillos/tuercas/herramientas (imagen que se muestra a continuación)
6	Castors	Ruedecillas




ENGLISH: Insert A1 screw into the two holes from the bottom of base frame (#1), fix it by spanner and bolt driver.



Insert the adjusting tube (#3) into the tube which fixed on table, use screw and nuts of A2, B2, C1, D1 to fix, repeat this for the two holes.



Insert the adjusting tube (#3) into the table supporting tube (#2), then adjust the height needed, and fix it by knob.

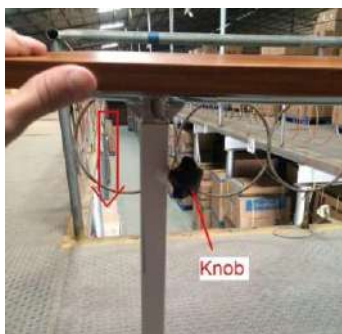

Press the button to lock the wheel, pull the button up to release locking.



ESPAÑOL: Introduzca los tornillos A1 en los dos agujeros de la parte inferior del marco base (n.º 1) y apriételos con la llave y el atornillador de pernos.



Introduzca el tubo de ajuste (n.º 3) en el tubo que ha quedado fijo a la mesa y utilice los tornillos y las tuercas A2, B2, C1 y D1 para ajustarlo. Repita este paso con los dos agujeros.



Introduzca el tubo de ajuste (n.º 3) en el tubo de soporte para la mesa (n.º 2), colóquelo a la altura que desee y fíjelo con el pomo.



Presione hacia abajo el botón para bloquear las ruedas y levántelo para desbloquearlas.

