

INSTRUCCIONES DE USO Y CONSERVACIÓN

LÍNEA ANTIESCARAS VARIOS ORTOTEX MEDICAL

CUBRE APOYABRAZOS
REF. 729



RESPALDO SILLA
REF. 730



SABANILLA ANTIESCARAS
REFs. 734, 735, 736



SABANILLA DOBLE CARA
REFs. 634, 635, 636



SABANILLA LAMBSKIN
REF. 1745



SÁBANA AJUSTABLE REFs.
746, 747, 748, 749, 750, 822



MUÑEQUERA
ANTIESCARAS REF. 733



ORTOTEX MEDICAL S.L.
CALLE CEFERINO AMADOR S/N
30195 Archivel (Murcia) ESPAÑA
Teléfono: +34 968726465
www.ortotexmedical.com

Estimado cliente,

Le agradecemos la confianza depositada en nosotros, en Ortotex Medical estamos a su disposición para ayudar a que mejore de la forma más rápida posible. Lea estas instrucciones de uso atentamente y guárdelas junto con su envase para cualquier necesidad en un futuro. En caso de duda consulte con su médico, ortopedia o contacte con nosotros vía mail o por teléfono.

ORTOTEX MEDICAL S.L. Da garantía para todos los productos que fabrica, si los mismos no han sido manipulados ni alterados en su configuración original, excluyendo de este precepto el uso prescrito en las presentes instrucciones. Tampoco están garantizados los que, debido a un mal uso, se produzca cualquier tipo de rotura. Si tiene que hacer uso de la garantía, comuníquese con el centro donde lo adquirió, ellos lo gestionarán para solucionarlo de la forma más rápida y satisfactoria para todas las partes.

Los cubre apoyabrazos, respaldo de silla, codera, muñequera, sabanillas y sábanas ajustables de ORTOTEX MEDICAL, S.L. tienen una vida útil aproximada de 6 meses a un año con un uso diario e intensivo. En caso de que el uso sea esporádico, puede prolongarse hasta los dos años o por encima de esta duración. La vida útil está en función de la correcta utilización y mantenimiento del producto según las especificaciones descritas en el manual del usuario.

Si se produce un incidente grave provocado o relacionado con el producto, por favor, comuníquelo a la autoridad competente en su Estado y a ORTOTEX MEDICAL S.L.

NORMATIVA APLICABLE

Toda esta línea de artículos son productos sanitarios de Clase I. Análisis y ensayos realizados: Para minimizar los riesgos que pudiesen existir según UNE EN ISO 14971:2022 y ensayos clínicos según normas UNE EN ISO 16840-2 ("Productos sanitarios. Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios") y 12182 ("Productos de apoyo para personas con discapacidad. Requisitos generales y métodos de ensayo").

INDICACIONES

- Prevención de escaras y como método auxiliar en su tratamiento.
- Personas que permanecen periodos de tiempo prolongados en la misma posición donde los segmentos corporales están en contacto con la superficie de la cama o son sometidos a constantes roces por la ropa de cama o superficies rugosas.

Zonas de protección por producto:

- **Muñequera:** apófisis estiloides y en situaciones de venoclisis.
- **Cubre apoyabrazos:** Zona del antebrazo.
- **Respaldo asiento silla:** Zona dorsal.
- **Sabanillas:** Superficie corporal para la que se requiera su uso.
- **Sábanas ajustables:** Toda la superficie corporal.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

Para obtener el mayor grado de eficacia terapéutica en las diferentes patologías y prolongar la vida útil del producto, es fundamental la elección correcta de la talla más adecuada a cada paciente o usuario. Una compresión excesiva puede producir intolerancia por lo que aconsejamos regular la compresión hasta el grado óptimo.

Ante cualquier duda sobre la correcta utilización y funcionamiento del producto, confíe en su técnico ortoprotésico y/o en personal sanitario capacitado para ello.

Para su colocación deben observarse los siguientes aspectos:

Asegurar que la superficie de contacto con el usuario está bien estirada, sin pliegues, en posición horizontal, limpia y seca. La cara de piel de cordero sintético es la que entra en contacto con el usuario. MUÑEQUERA.

- 1- Despegue las cinchas o fijaciones ajustables del producto y apoye/introduzca el respectivo segmento corporal en su interior.
- 2- Proceda al cierre, a modo de obtener un ajuste cómodo, sin que se produzcan molestias.

CUBRE APOYABRAZOS, RESPALDO DE SILLA

Ajuste las cintas o fijaciones ajustables del producto de forma firme al respaldo o brazo de la silla según corresponda.

SABANILLAS Y SÁBANAS AJUSTABLES.

Coloque la sabanilla en la superficie deseada procurando que esté lo más estirada posible. Ajuste los cuatro puntos de la sábana ajustable al colchón.

PRECAUCIONES

Antes de cada uso compruebe que el producto está en perfectas condiciones. Si observa alguna deficiencia póngalo en conocimiento del establecimiento donde lo adquirió lo antes posible.

El material que compone el producto es inflamable. No lo exponga a situaciones que puedan conllevar su ignición. En caso de que se produzca, quíteselo o aléjese y sofoque el fuego con los medios adecuados para hacerlo.

Si detecta cualquier deterioro en la piel con motivo del uso del producto, retírelo y consulte con su médico o técnico ortoprotésico. Uso recomendado del producto para pieles intactas sin heridas o cicatrices.

RECOMENDACIONES – ADVERTENCIAS

Use los productos según sus indicaciones. Se recomienda su uso por un único usuario y sólo para los fines indicados en las instrucciones o recomendado por su médico. Tras el uso por el usuario al que va destinado, se recomienda proceder a su desecho. Para desechar el envase y producto, cumpla la normativa legal de su comunidad.

CONSERVACIÓN Y LAVADO

Conservación: cepille o sacuda periódicamente la cara de la fibra o lana para mantenerla en condiciones óptimas y alargar la vida útil del producto.

Lavado fibra sintética (sabanillas, sábanas ajustables, muñequera, cubre apoyabrazos, respaldo asiento): pegar los velcros entre sí o cerrar la cremallera (si los tuviera).

Lavado a máquina:  lave a máquina con jabón neutro, centrifugado suave y esterilizable en autoclave. Dejar secar a temperatura ambiente. No use lejía. No tienda ni planche y no exponga a fuentes de calor directas como estufas, calefactores, radiadores, exposición directa al sol, etc. No limpie en seco. Durante su uso o en su limpieza: no utilice lejías, alcoholes, pomadas o líquidos disolventes. Si el producto no está bien escurrido, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto.

Lavado a máquina (sabanilla Lambskin):  lave a máquina o a mano con jabón neutro, centrifugado suave. Dejar secar a temperatura ambiente. No use lejía. No tienda ni planche y no exponga a fuentes de calor directas como estufas, calefactores, radiadores, exposición directa al sol, etc. No limpie en seco. Aconsejable para obtener la forma original, estirar suavemente con el producto húmedo.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN: Manipule el producto según aparece en estas instrucciones. Almacenamiento: Para evitar su deformación se recomienda colocarlo en posición horizontal y sin apilar nada encima. Conservar en lugar seco a temperatura ambiente.

Fecha de creación: 07/2022

Fecha de revisión: 07/2022 | Rev. 1.0