

INMOVILIZADOR DE HOMBRO

Paso 1: Antes de colocar el inmovilizador, elegir la talla adecuada, según la medida del miembro superior del paciente.

Paso 2: Colocar el codo dentro del cabestrillo, junto a la parte cerrada del mismo (ver imágenes).

Paso 3: Pasar la cinta superior por el cuello. Abrochar y regular a la altura adecuada pasando por la anilla superior y usando para ello la cinta velcro (ver imágenes).

Paso 4: Pasar la cinta inferior (la que queda al lado del codo) alrededor de la cintura y abrocharlo pasando por la anilla inferior, usando para ello la cinta velcro (ver imágenes).

