


COLLARIN CERVICAL SEMI-RIGIDO DE ESPUMA DE POLIETILENO Y POLIURETANO

Paso 1: Antes de colocar el collarín cervical , elegir la talla adecuada al paciente, según la medida del cuello.

Paso 2: Inmovilizar la cabeza del paciente, y de ser posible posicionar la misma de forma neutral y alineada.

Paso 3: Colocar el collarín cervical alrededor del cuello del paciente, dejando las cintas velcros en la parte trasera y la parte curvada en forma cóncava en la parte delantera, para el apoyo de la barbilla (ver imágenes).

Paso 4: Ajustar el collarín cervical, usando para ello las cintas velcros, y teniendo en cuenta que no debe colocarse demasiado ajustado (ya que dificultaría el retorno venoso de la cabeza) ni demasiado suelto (ya que no cumpliría con su función de sujeción-inmovilización de la cabeza-columna).

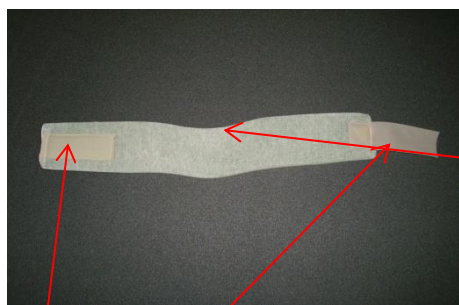

Parte curvada en forma cóncava para apoyo de la barbilla

Cintas velcros para cierre y ajuste del collarín cervical

