

# INSTRUCCIONES DE USO Y CONSERVACIÓN

LÍNEA ANTIESCARAS VISCOELÁSTICA INYECTADA ORTOTEX MEDICAL

ANATÓMICO REF. 1760  
PMU: 80kg



ANATÓMICO REF. 1780  
PMU: 100kg



COXIS REF. 11760  
PMU: 80kg



COXIS REF. 11780  
PMU: 100kg



HERRADURA REF. 2272960  
PMU: 75kg



HERRADURA REF. 2272980  
PMU: 95kg



OVALADO BLANCO  
REF. 22725 PMU: 90kg



OVALADO NEGRO  
REF. 22725N PMU: 90kg



ORTOTEX MEDICAL S.L.  
CALLE CEFERINO AMADOR S/N  
30195 Archivel (Murcia) ESPAÑA  
Teléfono: +34 968726465  
[www.ortotexmedical.com](http://www.ortotexmedical.com)

Estimado cliente,

Le agradecemos la confianza depositada en nosotros, en Ortotex Medical estamos a su disposición para ayudar a que mejore de la forma más rápida posible. Lea estas instrucciones de uso atentamente y guárdelas junto con su envase para cualquier necesidad en un futuro. En caso de duda consulte con su médico, ortopedia o contacte con nosotros vía mail o por teléfono.

ORTOTEX MEDICAL S.L. Da garantía para todos los productos que fabrica, si los mismos no han sido manipulados ni alterados en su configuración original, excluyendo de este precepto el uso prescrito en las presentes instrucciones. Tampoco están garantizados los que, debido a un mal uso, se produzca cualquier tipo de rotura. Si tiene que hacer uso de la garantía, comuníquese con el centro donde lo adquirió, ellos lo gestionarán para solucionarlo de la forma más rápida y satisfactoria para todas las partes.

Los **cojines antiescaras** de ORTOTEX MEDICAL, S.L. tienen una vida útil aproximada de 6 meses a un año con un uso diario e intensivo. En caso de que el uso sea esporádico, puede prolongarse hasta los dos años o por encima de esta duración. La vida útil está en función de la correcta utilización y mantenimiento del producto según las especificaciones descritas en el manual del usuario.

Si se produce un incidente grave provocado o relacionado con el producto, por favor, comuníquelo a la autoridad competente en su Estado y a ORTOTEX MEDICAL S.L.

## NORMATIVA APLICABLE

Toda esta línea de artículos son productos sanitarios de Clase I. Análisis y ensayos realizados: Para minimizar los riesgos que pudiesen existir según UNE EN ISO 14971:2022 y ensayos clínicos según normas UNE EN ISO 16840-2 ("Productos sanitarios. Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios") y 12182 ("Productos de apoyo para personas con discapacidad. Requisitos generales y métodos de ensayo").

## INDICACIONES

	Propiedades viscoelástica inyectada	Indicaciones Comunes para todos los cojines	Indicaciones particulares.
Anatómico 60 kg/m3 Ref. 1760	Espuma viscoelástica inyectada con una gran capacidad de envolvimiento de la superficie corporal, lo que aumenta el área de contacto entre el cojín y el cuerpo y absorbe el impacto de las cargas. Prevención y descarga de puntos de presión corporal por movilidad reducida y sedestación prolongada, alivio de presiones corporales que ayudan a evitar contracturas, molestias y dolor (lumbalgia, coccigodinia, escaras, úlceras, etc). Posee excelentes propiedades de "memoria de forma" y diseño anatómico, siendo muy eficaz en la distribución del peso del usuario evitando presiones excesivas en la zona del coxis consiguiendo una adecuada estabilidad pélvica.	Prevención de la aparición de úlceras por presión debidas a la restricción del flujo de sangre como consecuencia de la compresión puntual de las redes arteriales de los tejidos blandos cuando se encuentran entre dos planos duros: la superficie ósea y el plano de apoyo (cama o silla).  Proporcionar un apoyo eficaz desde el que el usuario pueda realizar sin dificultad una amplia variedad de tareas.  Generar confort, ayudar a mantener la postura, absorber los impactos que se producen al desplazar la silla de ruedas, al realizar trabajos o durante las transferencias.	Prevención de escaras en personas con alto riesgo y como método auxiliar en su tratamiento. - Fracturas y otros procesos álgicos de la región sacrococcigea. - Dolor anal crónico idiopático (DACI). - Bursitis de cadera. - Ayuda para cambios de postura. - Ligeras asimetrías posturales. - Personas, incontinentes o no, que permanecen periodos de tiempo prolongados en sedestación. - Condiciones que necesiten control y estabilidad postural desde la zona pélvica. - Alivio de dolor post-parto y recuperaciones post-operatorias en general. - Estabilidad pélvica y soporte postural ML y AP moderados.
Anatómico 80 kg/m3 Ref. 1780			
Anatómico coxis 60 kg/m3 Ref. 11760			
Anatómico coxis 80 kg/m3 Ref. 11780			
Anatómico herradura 60 kg/m3 Ref. 2272960			
Anatómico herradura 80 kg/m3 Ref. 2272980			
Ovalado Ref. 22725			
Ovalado Negro Ref. 22725N			

## INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

Para obtener el mayor grado de eficacia terapéutica en las diferentes patologías y prolongar la vida útil del producto, es fundamental la elección correcta del modelo más adecuado a cada paciente o usuario.

Ante cualquier duda sobre la correcta utilización y funcionamiento del producto, confíe en su técnico ortoprotésico y/o en personal sanitario capacitado para ello.

### Para su colocación deben observarse los siguientes aspectos:

- Se puede utilizar en silla de ruedas o en cualquier tipo de asiento (silla, sillón, ...).
- Coloque el cojín sobre la superficie del asiento y, por medio de las cintas (en los modelos que dispongan de ellas), áttelo a su estructura rígida.

## PRECAUCIONES

Antes de cada uso compruebe que el producto está en perfectas condiciones. Si observa alguna deficiencia póngalo en conocimiento del establecimiento donde lo adquirió lo antes posible.

El material que compone el producto es inflamable. No lo exponga a situaciones que puedan conllevar su ignición. En caso de que se produzca, quíteselo o aléjese y sofoque el fuego con los medios adecuados para hacerlo.

Si detecta cualquier deterioro en la piel con motivo del uso del producto, retírelo y consulte con su médico o técnico ortoprotésico. Uso recomendado del producto para pieles intactas sin heridas o cicatrices.

## RECOMENDACIONES – ADVERTENCIAS

Use los productos según sus indicaciones. Se recomienda su uso por un único usuario y sólo para los fines indicados en las instrucciones o recomendado por su médico. Tras el uso por el usuario al que va destinado, se recomienda proceder a su desecho. Para desechar el envase y producto, cumpla la normativa legal de su comunidad.

## CONSERVACIÓN Y LAVADO

Lavado funda exterior: max. 90°. No usar lejía ni derivados. No planchar. No se recomienda lavado en seco o secado a máquina. Se puede limpiar con un paño o esponja húmeda.

## NO LAVAR LA ESPUMA VISCOELÁSTICA

Durante su uso o en su limpieza: no utilice lejías, alcoholes, pomadas o líquidos disolventes. Si el producto no está bien escurrido, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN:** Manipule el producto según aparece en estas instrucciones. Almacenamiento: Para evitar su deformación se recomienda colocarlo en posición horizontal y sin apilar nada encima. Conservar en lugar seco a temperatura ambiente.